



MAESELLE

AGELESS EVERYDAY



**Protokół Zabiegowy
pielęgnacji skóry głowy
po przeszczepach włosów**



maeselle.com

O MARCE

Marka **Maeselle** wywodzi się z samego serca Hiszpanii – **Barcelony**.

To właśnie tam tworzone są innowacyjne formuły, które powstały w trosce o zdrową i promienną skórę.



Marka stworzona na bazie 20 letniego doświadczenia w branży medycyny estetycznej. Skuteczność i efektywność to główne cechy działania preparatów MAESELLE.

Skupia się na trudnych problemach takich jak przebarwienia, łysienie, utrata gęstości oraz odnowa i rewitalizacja szczególnie potrzebującej i wrażliwej okolicy OCZU.



NUCLEOLIFT

NUCLEOLIFT to wysoko skuteczny biostymulator tkankowy, który wspomaga regenerację i wzrost nowych włosów. Składniki aktywne preparatu działają synergistycznie, zapewniając optymalne warunki do wzrostu włosów.

Wskazania:

- łysienie androgenowe
 - łysienie telogenowe
 - łysienie plackowate
- stany po przeszczepie włosów
- słabe ukrwienie skóry głowy
 - sucha skóra głowy
- przedwczesne siwienie



NUCLEOLIFT

SKŁAD

- **Polinukleotydy:** Pozyskiwane z DNA i RNA pochodzenia morskiego, zawierają siarczan protaminy, który ma silne działanie regeneracyjne.
- **Witamina B5:** Wzmacnia i wygładza strukturę włosa, opóźnia proces siwienia.
- **Witamina E:** Poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych, stymuluje wzrost włosów, działa jako przeciwutleniacz.
- **Tripeptide-1:** Stymuluje wzrost włosów, poprawia mikrocyrkulację, hamuje działanie 5- α -reduktazy, enzymu odpowiedzialnego za wypadanie włosów.



PRZESZCZEP WŁOSÓW

Przeszczep włosów to zaawansowany zabieg chirurgiczny polegający na przeniesieniu mieszków włosowych z obszaru dawczej (obszar o nieprzerwanym wzroście włosów) do obszaru biorczego (obszar objęty łysieniem). Kluczowym aspektem po przeszczepie jest właściwa pielęgnacja skóry głowy, która wspiera proces regeneracji i wzrostu nowych włosów.

Proces Odrastania Włosów

- 3-6 tygodni po zabiegu: Wypadanie około 80% przeszczepionych włosów.
- 3-4 miesiące po zabiegu: Rozpoczęcie odrastania włosów z korzeni pozostawionych w skórze głowy.



PROCEDURA ZABIEGOWA

Między 10-12 tygodniem rozpoczynamy pobudzanie mikrocyrkulacji skóry głowy za pomocą mezoterapii igłowej preparatem Nucleolift, stosując metodę NAPPAGE.

- 3 pierwsze zabiegi: odstęp co 14-21 dni, ilość 2,5 ml, igła 30gx4mm.
- 3 kolejne zabiegi: odstęp 21 dni, metoda depozytowa, ilość 3-5 ml, igła 30gx4mm.



PROCEDURA ZABIEGOWA

Po zakończonej serii w celu zmaksymalizowania efektów i utrzymania prawidłowej kondycji skóry głowy do wzrostu włosów rekomendujemy wykonanie zabiegu przypominającego po 3 miesiącach oraz do powrotu do cyklu zabiegów po kolejnych 3 miesiącach.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


Zamówienia prosimy składać na adres
mailowy: **zamowienia@beautymed.pl**

oraz pod numerami telefonów:

+48 573 580 423

+48 573 580 413

+48 573 580 421

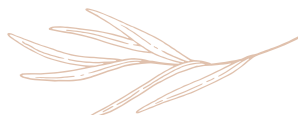

Maeselle
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 23 lok. 126, 02-386 Warszawa,
www.maeselle.com
www.shop.maeselle.com